

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

CE&DI



Europe

Ansell Healthcare Europe NV
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 ☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01
www.anselleurope.com

United States

Ansell Healthcare
 200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701
 ☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445
www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.
 Tokyo, Japan
 ☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd
 ☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8
 ☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited
 Level 3, 678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 ☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578
www.ansellasiapacific.com

Ansell

RĘKAWICE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I RĘKAWICE STOSOWANE W OTOCZENIU KRYTYCZNYM MARKI ANSELL

A. Zastosowanie

Tej instrukcji użytkownika należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na zamknięciu każdego opakowania lub w jego wnętrzu.

Niniejsze rękawice zostały zaprojektowane jako rękawice jednorazowego użytku, których należy się regularnie pozbywać. Są one odporne na działanie cieczy, w związku z czym mogą być używane jako ochrona przed rozpryskami niektórych substancji chemicznych. Ich projekt i oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej Dyrektywy 89/686/EEC i wprowadzonym do niej zmianom oraz odpowiadają stosownym europejskim normom.

Rękawice oznaczone poniższym piktogramem, oznaczającym kontakt z żywnością, są również zgodne z europejskimi rozporządzeniami nr 1935/2004 i 2023/2006, a także z właściwymi przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Należy zadbać o to, by rękawice były wyłącznie używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Objaśnienie piktogramów:

 <p>A B C D EN 388: 2003 Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi</p>	<p>A: Odporność na ścieranie B: Odporność na przecięcie C: Odporność na rozdzarcie D: Odporność na przebiecie</p>	 <p>A B C D E F G H I J K L EN 374: 2003 Czas potrzebny na przeniknięcie chemikaliów > 30 minut w przypadku:</p>	<p>A = metanol B = aceton C = acetonitryl D = dwuchlorometan E = dwusiarczek węgla F = toluen G = dwuetyloamina H = czterowodorofuran I = octan etylu J = n-heptan K = wodorotlenek sodowy, 40% L = kwas siarkowy, 96%</p>
 <p>EN 374: 2003 Ochrona przed mikroorganizmami (AQL ≤ 1,5)</p>	 <p>EN 374: 2003 Rękawice nieprzemakalne. Dane o odporności chemicznej dostępne na żądanie.</p>	 <p>EN 421 Ochrona przed skażeniem radioaktywnym</p>	 <p>Nadają się do użycia w kontakcie z żywnością</p>

Ostrzeżenie! Informacja zawarta w piktogramach lub dane dotyczące czasu odporności na przebiecie chemiczne są oparte na testach laboratoryjnych i z tego powodu mają tylko charakter doradczy, gdyż nie koniecznie odzwierciedlają faktyczny czas oddziaływania czynników na stanowisku pracy.

Świadectwo badania typu EC pochodzi od Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technopark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyników osiągniętych przez rękawice oraz kopii Deklaracji Zgodności, prosimy skontaktować się z firmą Ansell.

B. Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają wad lub innych niedoskonałości. Jeśli podczas użytkowania rękawice zostały podarte lub przedziurawione, należy je natychmiast wyrzucić. W razie wątpliwości, nie używaj rękawic, weź nową parę.
2. W przypadku, gdy rękawice są używane jako ochrona przed zagrożeniami chemicznymi, jest niezwykle istotne, by żadne środki chemiczne nie miały kontaktu ze skórą, nawet jeśli uważa się je za nieszkodliwe. Dlatego należy używać rękawic posiadających współczynnik ochrony 6 lub bardzo dobry wskaźnik odporności na rozkład. We wszystkich innych przypadkach należy rękawic wyłącznie używać w celu ochrony przed rozpryskami lub przed krótkim kontaktem z substancją. Należy zadbać o to, by środki chemiczne nie mogły się dostać do rękawic. Po dodatkowe informacje dotyczące stosowności rękawic jako środka ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, prosimy skontaktować się z działem technicznym firmy Ansell.
3. Unikaj używania rękawic zabrudzonych od środka – mogą one wywołać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów.
4. Skażone rękawice należy przed zdjęciem wyczyścić lub umyć.
5. Rękawic nie wolno używać do prac wymagających ochrony termicznej.
6. Rękawice jednorazowe w wersji o długości rękawicy poniżej 260 mm są typem „Rękawic do zastosowania specjalnym” ponieważ są one przeznaczone TYLKO do ochrony ręki przed rozpryskami substancji chemicznych podczas pracy przy chemikaliach. Nie używaj rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka.
7. Nie używaj rękawic do ochrony przed promieniowaniem jonizującym ani w pomieszczeniach izolacyjnych.
8. Nie wszystkie rękawice nadające się do użycia w kontakcie z żywnością mogą być używane z każdym rodzajem żywności. Niektóre rękawice mogą uwalniać zbyt wiele substancji do niektórych rodzajów żywności. Aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia mogą mieć zastosowanie oraz przy jakich konkretnych rodzajach żywności można używać rękawic, należy zwrócić się o poradę do działu technicznego firmy Ansell lub zapoznać się z deklaracją firmy Ansell w sprawie zgodności produktu z normami dotyczącymi żywności.
9. Jeśli rękawice są oznakowane, zadrukowane powierzchnie nie powinny stykać się z żywnością.

C. Składniki / Składniki niebezpieczne

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być ewentualną przyczyną alergii u uczulonych na nie osób, u których może się rozwinąć kontaktowe podrażnienie i/lub reakcja alergiczna.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Celem uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z działem technicznym firmy Ansell.

D. Instrukcje utrzymania rękawic

Magazynowanie: Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Czyszczenie: Rękawice nie nadają się do prania.

E. Utylizacja rękawic

Rękawice używane mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami.

Należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Zakopywanie lub spalanie rękawic należy przeprowadzać w warunkach kontrolowanych.